



Lectro Derm Kapillärprovtagningsdyna 6x9cm

MANUAL

Aktivera dynan genom att fånga upp metallknappen längst ner i ett hörn och tryck sedan in knappen så att den konvexa sidan blir konkav. Om dynan inte är använd på länge kan man behöva trycka ett par gånger. När dynan startar blir den hård och 54°C varm, massera ett par gånger så blir den mjuk. Vid användning på personer som inte kan bedöma värmen SKALL vår skyddspåse användas så att temperaturen dämpas. Vi rekommenderar att patienten i möjligaste mån själv värmer fingret medan du som sköter provtagningen tar fram det material som behövs. På detta sätt sparar du tid samtidigt som patienten själv kan reglera hur mycket värme som känns bra. Kontrollera att fingret är varmt innan du sticker. Om patienten är orolig är det mycket lämpligt att patienten kramar dynan i andra handen medan provtagningen sker. Värme är nämligen lugnande och gör att patienten slappnar av.

ÅTERLADDNING

Dynan återladdas i vår Thermoladdare som rymmer många dynor. För bästa funktion är det lämpligt att ha så många dynor som kan behövas under en dag så att du aldrig behöver ladda mer än en gång per dygn. Dynorna kan också återladdas i diskdesinfektor med lämpligt program.

ALLMÄNT

Det går bra att märka dynan med tuschpenna. Värmedynan kan vid enstaka tillfällen levereras hård. Ladda då enligt anvisningarna. Lagring: Dynan lagras laddad, (mjuk), i normal rumstemperatur. Undvik direkt solljus. Dynan tål inte hårdhänt hantering. Förbrukad dyna kan kastas bland konventionellt avfall.

RISKFRI HANTERING PÅ PATIENT

Värmedynan avger 54°C när den aktiveras. Värmen upplevs olika på olika hudpartier och av olika patienter så var därför alltid lyhörd för patientens upplevelse. Vi rekommenderar att patienten i möjligaste mån själv håller i dynan på av personalen avsedd plats på kroppen. Vid användning på personer som inte kan bedöma värmen SKALL vår skyddspåse användas så att temperaturen dämpas. Skyddspåse skall även användas om patienten medicineras, då detta kan påverka förmågan att reagera på dynans värme.

1. Värmedyna och laddare får endast användas av utbildad personal*
2. Använd aldrig återladdad dyna innan den svalnat till rumstemperatur.
3. Informera alltid patienten att säga till om dynan känns för varm.
4. Om dynan används på patient som inte kan förmedla hur värmen upplevs så **SKALL** vår skyddspåse användas. Tänk på försiktighetsprincipen, om minsta osäkerhet råder, använd skyddspåsen. Temperaturen med skyddspåse når som högst 46°C och sjunker sedan långsamt.
5. Använd inte värmedynan direkt på sårig hud.
6. Om dynan går sönder och innehållet hamnar på huden skall huden sköljas med ljummet vatten.
7. OBS! Dynan skall desinficeras mellan varje patient. Detta sker normalt via ångkokning men man kan även göra detta genom avtorkning med ytdesinfektionssprit/Virkon om dynan används till mer än en patient innan ångkokning/återladdning.

*Med utbildning avses att produktinformationen är läst och förstådd.

Värmedynan rekommenderas inte till neonatal.

Handelshuset Viroderm AB Tfn: +46 8 37 37 12 E-post: info@viroderm.se



Handelshuset Viroderm AB
Fabriksvägen 5
171 48 Solna
www.viroderm.se



2024-08



04-007