



## **Medisox** ANTITROMBOS/Förbandsstrumpa, öppen tå



### PRODUKTINFORMATION

**Medisox** antitrombos/förbandsstrumpa med öppen tå är en medicinsk kompressionsstrumpa.  
Kompression: klass 1 (16-21 mm Hg vid ankel, 10-12mmHg vad) enligt SS872400.

**Medisox** är en klass 1 produkt som säljs över disk utan recept.  
OBS: Strumpan är testad av ett oberoende tyskt testinstitut för att verifiera uppfyllande av krav på medicinska stödstrumpor klass 1.

#### **Användning:**

Efter operation, ersätter elastiska bandage tack vare strumpans graderade tryck. Vid mindre åderbräck (varicer). Tyngd, trötthetskänsla i benen. Enkla tillstånd av svullnad eller obehag i benen. Vid begynnande havandeskapsåderbräck och i förebyggande syfte. Förebygga och motverka blodpropp i benen vid långvarigt stillasittande.

#### **Tekniska fakta:**

1. Medisox förbandsstrumpa består av en hög andel bomull (55 %) för behaglig komfort. Övrigt material i strumpan är 30% polyamid och 15% lycra.
2. Strumpan är stickad utan strumpkrage, vilket underlättar blodcirkulation.
3. Förstärkt häl ökar strumpans hållbarhet.
4. Öppen tå tillåter kontroll av tårna.
5. Instickad, färgad storleksmarkering.
6. Finns i sju storlekar för bästa passform.
7. Tillverkad av OEKO-TEX100-certifierade garner. (Provade avseende hälsofarliga ämnen).
8. CE-märkta enligt förordning EU/2017/745 (MDR)
9. Förpackningen innehåller glidsocka.








#### **Medicinska effekter:**

Den terapeutiska effekten erhålls av det graderade trycket, högst vid ankeln sedan avtagande upp mot knät. Förebygger och lindrar åderbräck, blodpropp, motverkar svullnad/trötthet i fot och underben, förbättrar blodcirkulationen.


#### **Måttagning:**

Mät ankeln på smalaste platsen, mät vaden på bredaste platsen. En vanlig indikation på storlek kan t ex vara skostorlek 36-37 som motsvarar strumpstorlek 1 (Röd) och skostorlek 48-49 som motsvarar strumpstorlek 7 (Svart).


**Förpackning och artikelinformation:**

Artikelnummer	Färgkod		Ankel, cm	Vad, cm	EAN-kod	Förpackning
9001-1	Röd		17-21	28-33	7340062707985	10x5-par
9001-2	Gul		18-22	29-35	7340062707992	10x5 par
9001-3	Natur		19-24	30-37	7340062708005	10x5 par
9001-4	Blå		21-25	31-41	7340062708012	10x5 par
9001-5	Grön		23-26	33-45	7340062708029	10x5 par
9001-6	Grå		24-28	34-47	7340062708036	10x5 par
9001-7	Svart		25-29	35-48	7340062708043	10x5 par


**Användarinstruktioner:**

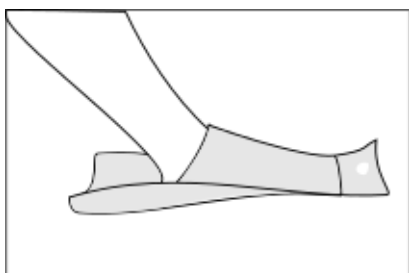


Figur 1 Sätt på den medföljande glidsockan.

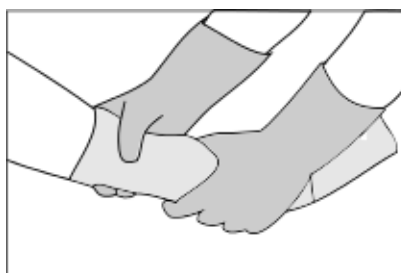


Figur 2 Ta på strumpan och dra den över hälen. Använd gärna diskhandskar så får du ett bra grepp.

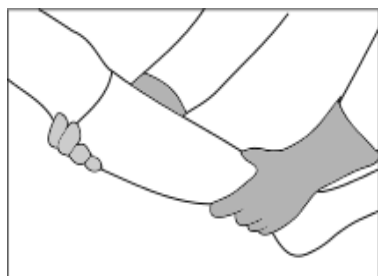

Figur 3 Strumpan ska sluta ca 3,5-4 cm under knävecket. Är strumpan för lång kan den klippas av. OBS vik ej ner den.

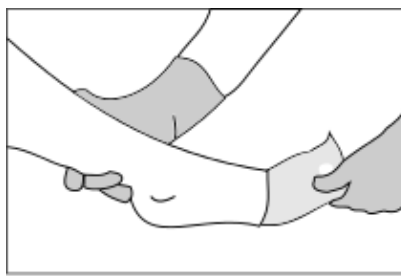

Figur 4 Dra av glidsockan.

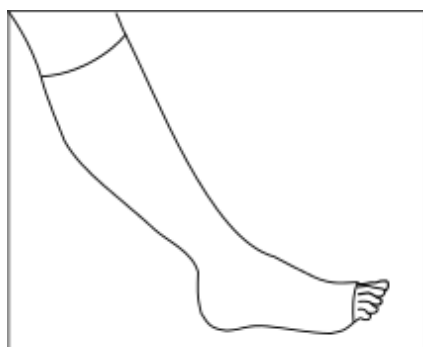

Figur 5 Färdig!

**Skötselråd:**

Strumporna håller längre om du tvättar dem varje dag, de tål 95°C, samt att de då behåller sina medicinska egenskaper. Får ej klortvättas. Produktens hållbarhet beräknas till minst 1 år alternativt 500 tvättar.